



FARMOR SARL

Fiche Technique du produit référence ECH 6071 TR
Echarpe triangulaire



Descriptif : Echarpe triangulaire en non tissé. Elle permet de soutenir un bras blessé ou de maintenir toutes autres parties du corps. Elle est emballée individuellement avec mode d'emploi.

	TRIANGLE POUR ECHARPE	CE
	A - Elles permettent de soutenir un bras blessé 1) - Glisser l'écharpe entre l'avant bras et le coude tout en laissant un bout sur l'épaule 2) - Relever l'autre bout de l'écharpe sur l'autre épaule et rassembler par un nœud plat autour du cou B - Elles permettent d'emballer toute partie du corps Thorax - coude - jambe - main...	

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

FARMOR s.a.r.l.
Parc de l'Esplanade – 16 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

Tél : 01.60.31.59.59
Fax : 01.60.07.56.31
www.ifarmor.com

Photo non contractuelle