



FARMOR SARL

Fiche technique du produit référence PAD 1003 PP
Pak Pad Pediatric




MODE D'EMPLOI :


Le PAK PAD PEDIATRIC est indiqué dans le traitement de patients souffrant d'arrêt cardio-pulmonaire, avec perte de connaissance, dont le pouls est indétectable et qui ne respirent pas spontanément.

Il permet au SAMARITAN PAD d'administrer à des nourrissons et des enfants jusqu'à 8 ans, ou d'un poids de 25 kg, un traitement à faible consommation d'énergie. Formellement déconseillé aux patients de moins d'un an.

Seuls les électrodes SAMARITAN PADS portant l'étiquette  peuvent être utilisées avec le PAK PAD PEDIATRIC. Si le SAMARITAN PAD que vous utilisez ne porte pas cette étiquette, utilisez le kit électrodes pour adulte, si vous ne disposez d'aucune autre possibilité.

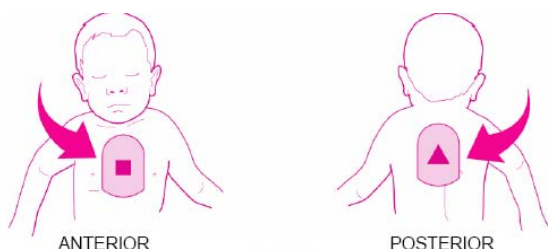

b)

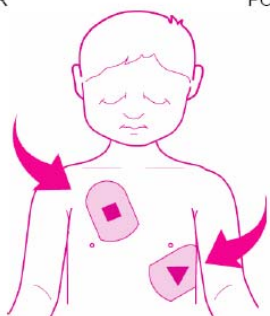

On peut mettre en place les électrodes si la taille de la poitrine de l'enfant est suffisamment large.

OU BIEN

si le traumatisme interdit une mise en place comme celle de la figure a).

Les électrodes de défibrillation doivent être espacées d'environ 2.5 cm au moins et ne doivent jamais se toucher.

La poitrine de la victime doit être dénudée et sèche lorsqu'on pose les électrodes.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

FARMOR s.a.r.l.
Parc de l'Esplanade – 16 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

Tél. : 01.60.31.59.59
Fax : 01.60.07.56.31
www.ifarmor.com

Photo non contractuelle